

■ **제품명:** Backflush Extrusion Handpiece

■ **품목명:** 안과용관류흡인기

■ **모델명:** 제품참조

■ **허가/인증/신고번호:** 수인 23-4630 호

■ **포장단위:** 포장참조

■ **수입업자:** (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ **제조사:** Bausch & Lomb GmbH (독일, Im Schuhmachergewann 4, 69123 Heidelberg)

■ **제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp):** 포장참조

■ **저장방법:** 실온보관

■ **사용목적:**

안과적 수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기

■ **부작용 보고 관련 문의처:** 080-080-4183 (한국의료기기안전정보원)

■ **사용방법:**

가. **사용 전 준비사항**

포장 상태를 확인하여 포장이 손상된 경우 사용하지 않는다.

나. **사용방법 및 조작방법**

1. 포장 상태를 확인한다.
2. 필요시 실리콘 튜브, 슬립 커플러를 이용하여 함께 사용하는 장비에 연결한다.
3. 실리콘 저장소를 손가락으로 누르거나 실리콘 저장소의 측면에 위치한 Venting Hole을 손가락으로 막거나 열어서 유체의 흐름을 조절한다.

다. **사용 후 보관 및 관리방법**

일회용 의료기기로 재사용 및 재멸균 하지 않는다.

■ **사용 시 주의사항:**

가. **주의**

- 이 제품을 재처리 및/또는 재사용하는 경우 Bausch & Lomb은 제품의 기능, 재료 구조 또는 청결이나 무균을 보증할 수 없다.
- 재사용은 환자나 사용자에게 질병, 감염 및/또는 부상을 초래할 수 있으며, 극단적인 경우사망에 이를 수 있다.
- 이 제품은 일회용이며, 단일 환자에게만 한 번만 사용하도록 의도된 장치이다.
- 본 제품은 일회용 제품이므로 재사용을 금지하고 반드시 규정에 의하여 폐기하도록 한다.